



# シリコンレサシバッグ分解・組立・作動確認書

NK-101MR/NK-102MR/NK-103MR

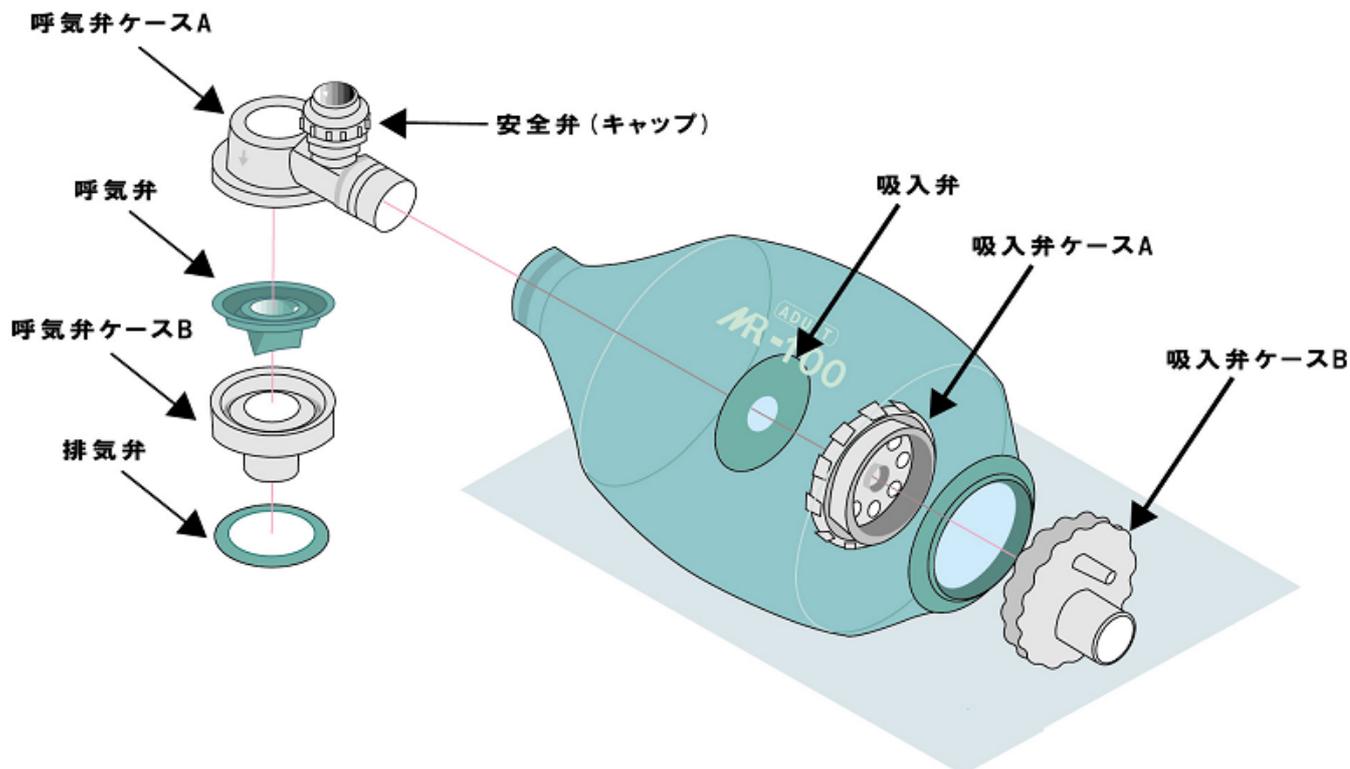

## A 分解手順

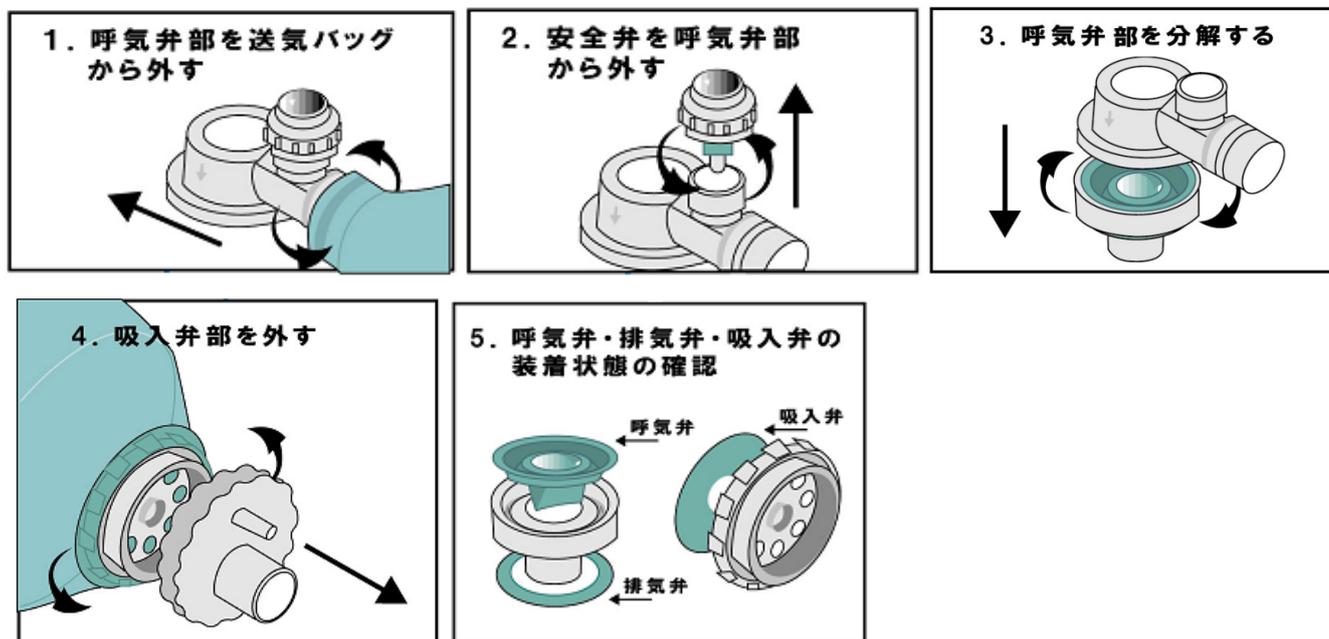


## B 洗浄・消毒・滅菌

1. 使用後は、各構成品を損傷しないように水又は温水で洗浄し、薬液消毒又はオートクレーブによる滅菌を行ってください。
  - ① 薬液消毒剤(例:グルコン酸クロルヘキシジン液 0.1~0.5%溶液水)で消毒し、構成品をよく濯いだ後、乾燥させてから組み立ててください。
  - ② 本製品に使用されている構成品は、全てオートクレーブによる滅菌が可能です。  
(材質:全ての弁=シリコンゴム、その他のプラスチック部=高品質ポリサルフォン樹脂)

## C 組立手順


消毒又は滅菌の後、各構成品に損傷等がないことを確認し、分解図を参照しながら、上述の分解手順の逆の順番で組立ててください。特に、下記の各弁の装着には十分注意してください。

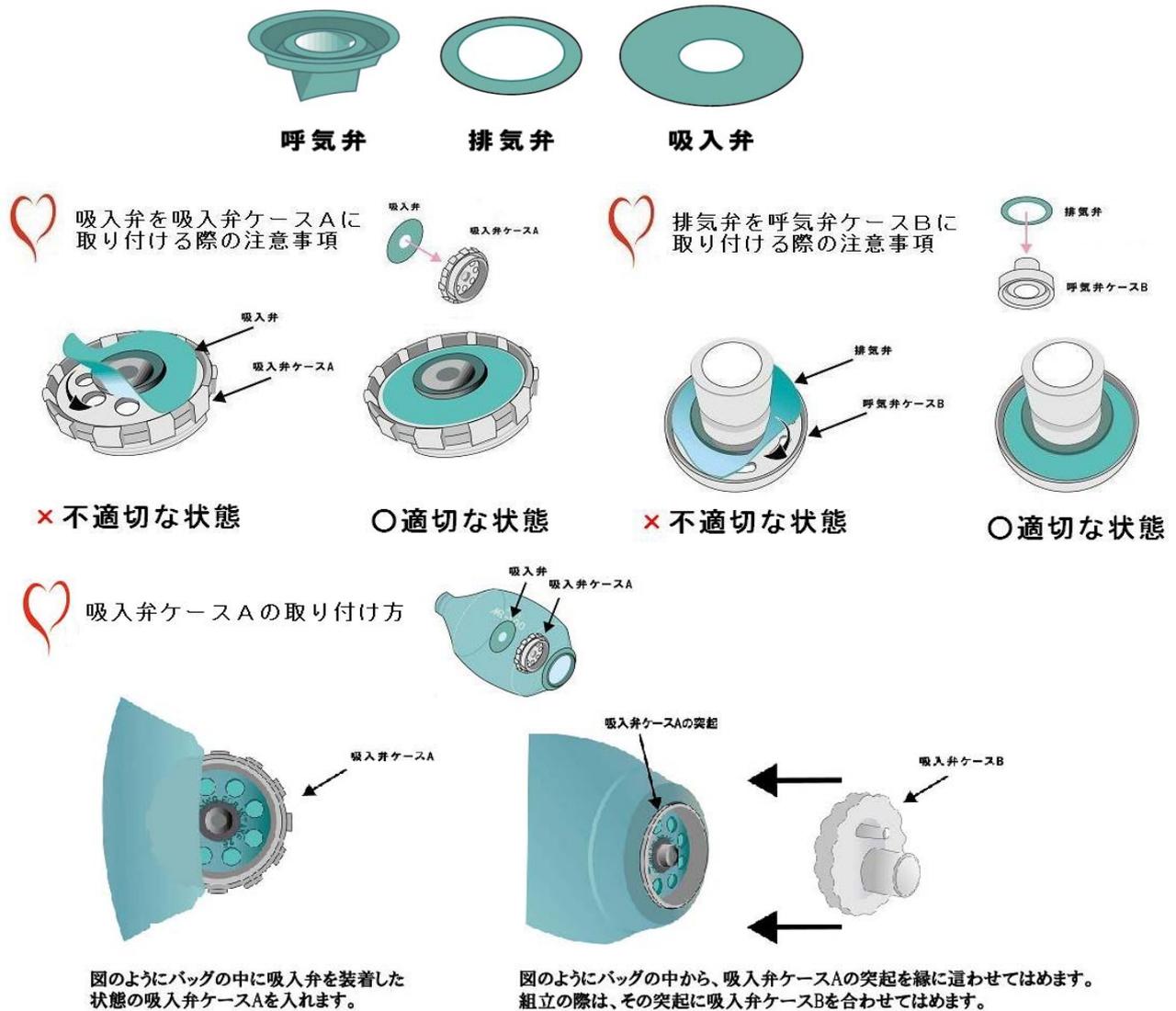

## D 作動確認

組立後、下記の手順にて作動確認を行ってください。

- ① 小児用及び乳児用の場合、呼気弁のマスク接続口を手で塞ぎ、バッグを強く圧迫したとき、安全弁が作動することを確認します。
- ② 成人用(安全ロック機能付)の場合、

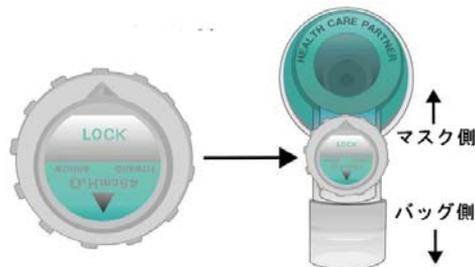

- ・安全弁上の「45cmH<sub>2</sub>O」の表示をマスク側に合わせます。バッグを強く圧迫したとき、安全弁が作動することを確認します。
- ・また、安全弁上の「LOCK」表示をマスク側に合わせ、バッグを圧迫したとき、安全弁及び各接続部から空気の漏れがないことを確認する。